TRADITION TRIFFT INNOVATION



Traditionell Kontinuierlich PTT-Methode

Oszillometrische Messung



CARDIOdiagnostics A division of SOMNOmedics

BASISGERÄT ABPMpro Oszillometrische Langzeit-Blutdruckmessung

- Leichtes, komfortabel zu tragendes System ohne Schlauch
 - Befestigung direkt am Oberarm des Patienten per Schiebehalterung
- Interne Sensoren für Aktivität und Körperlage
 - Korrelation des Blutdrucks zu Aktivität (am Tag) und Körperlage (in der Nacht)
 - ‡Schlaf-Wach-Bestimmung, individuelle Festlegung der TIB, genauere Blutdruck-Klassifikation und Einordnung von Dipping/Non-Dipping
 - Wiederholung der Messung, falls zu viel Bewegung registriert
- Messung während Aufpump- und/oder Ablassvorgang
 - Back-up Messung während Ablassen, falls Aufpumpvorgang artefaktbehaftet
 - · Höherer Informationsgehalt durch zweifache Messung
- Graphische Darstellung des Pumpvorgangs in der Software und auf dem Gerätedisplay
- Aufzeichnung des Manschettendrucks
 - Eliminierung von Artefakten bei der Auswertung



Anschlüsse für externe Sensoren: EKG / Pleth

Integrierte Sensoren für Aktivität / Körperlage

USB-Anschluss

UP RADE

Oszillometrischer Langzeit-BD + Langzeit EKG

UP GRADE Langzeit-BD + EKG + Pleth

3-Kanal-EKG-Sensor (Holter)

- Langzeit-EKG-Messung Erkennung von Arrhythmie, Akzeleration, Dezeleration und RR-Intervallen
- Exakte Körperlage-Bestimmung (Thorax)
- Bestimmung der Kardio-Impedanz, alternativ: Herzschrittmacher-Erkennung
- Export der EKG-Daten zur Auswertung mit externer Langzeit-EKG-Analysesoftware

Plethysmographie-Sensor

- Detektion der Pulswelle
- Pulswellenanalyse (PWA),
 Pulswellengeschwindigkeit
 (PWV) als Maß der Gefäßsteifigkeit
- Detektion autonomer Arousal basierend auf dem Pleth-Signal


Tradition trifft Innovation

Kontinuierliche, nicht-invasive Blutdruckmessung OHNE Aufpumpen der Manschette

- Herzschlaggenaue Abbildung des systolischen und diastolischen Blutdruckverlaufs (in mmHg) mit allen Minima und Maxima durch Puls-Transit-Zeit (PTT)-basierte kontinuierliche Blutdruckmessung
- ◆ Maximale Flexibilität durch die Kombination von oszillometrischer und PTT-basierter kontinuierlicher Blutdruckmessung
- Keine Messwertverfälschung durch rückwirkungsfreie Messung, keine Störung des Schlafs, kein daraus resultierender Anstieg des Blutdrucks
- Erfassung von Nächtlichen Blutdruck-Fluktuationen (NBPF)


SOFTWARE (lizenzfrei)

Automatisches Auslesen der Messdaten (USB-Anschluss), Analyse und Reporterstellung

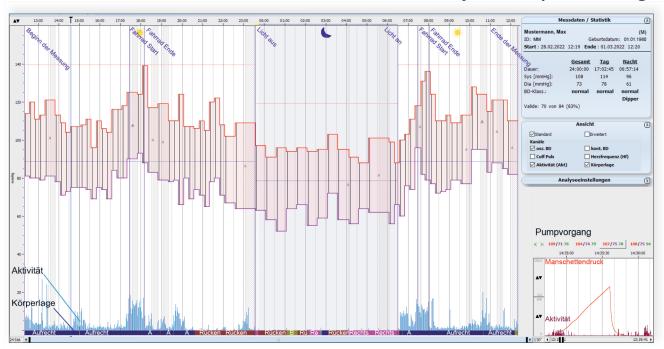

- Standardansicht: Analysedaten für schnellen Überblick über den 24 h-Blutdruck-Verlauf
- Erweiterte Ansicht: Rohdaten zur Überprüfung von Artefakten / Verifizierung der Messwerte
- Anzeige aller Messdaten: sys/dia Blutdruck, mittlerer arterieller Druck, Herzfrequenz, Pulsdruck, Körperlage, Aktivität, Tag/Nachtzeit
- Darstellung des Pumpvorgangs in der Software

REPORT

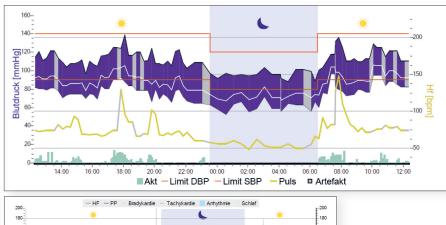



| Gesamt-Auswertung Tag-Auswertung | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | Ø Min. | Mittel. | Ø Max. | STABW | > Limit | | Ø Min. | Mittel. | Ø Max. | STABW | > Limit |
| Syst. [mmHg] | 77 | 108 | 155 | 11,7 | 0,6 % | Syst. [mmHg] | 77 | 114 | 155 | 9,1 | 0,9 % |
| Diast. [mmHg] | 15 | 71 | 120 | 12,2 | 5,3 % | Diast. [mmHg] | 15 | 77 | 120 | 10,2 | 7,4 % |
| Hf [bpm] | 46 | 76 | 181 | 24,9 | 32,8 % | Hf [bpm] | 55 | 84 | 181 | 23,4 | 44,8 % |
| MAD [mmHg] | 42 | 83 | 127 | 11,5 | 2,9 % | MAD [mmHg] | 42 | 89 | 127 | 9,1 | 4,0 % |
| PP [mmHg] | 20 | 37 | 105 | 7,8 | 1,0 % | PP [mmHg] | 20 | 37 | 105 | 8,2 | 1,1 % |
| Ø Min und Ø Max berechnet als Mittelwert von 8 Werten. Limit: Syst = 140 mmHg, Diast = 90 mmHg, Puls = 80 bpm, MAP = 105 mmHg, PP = 60 mm | | | | | | | | | | | |
| No. BP Values: 81638 (84% TRT) | | | | | | | | | | | |
| Tag/Nacht Abs | enkuna | | | | | | Ø Min. | Mittel. | Ø Max. | STABW | > Limit |
| Syst. [mmHa] | -16.7 % | | O B Bi | | Syst. [mmHg] | 78 | 95 | 109 | 4 | 0,0 % | |
| Diast, [mmHq] | -23.4 | | Reverse Dipper | | | Diast. [mmHg] | 30 | 59 | 80 | 6,4 | 0,0 % |
| Hf [bpm] | -23,4 % | | O Non-Dipper | | | Hf [bpm] | 46 | 56 | 101 | 6,8 | 3,3 % |
| ni [iliqu] ir | -20.2 | | Dipp | er | | MAD [mmHg] | 49 | 71 | 87 | 5 | 0,0 % |
| AAD (monthe) | | | O Extre | me Dipper | | PP [mmHg] | 20 | 36 | 68 | 6,2 | 0,6 % |
| MAD [mmHg] | 2.7 | | | | | Limit: Syst = 120 mmHg, Diast = 80 mmHg, Puls = 70 bpm, MAP = 90 mmHg, PP = 50 mm | | | | | |
| MAD [mmHg] PP [mmHg] Einklassifizier | -2,7 | | | | | Limit: Syst = 120 mm | nHg, Diast = 8 | u mmrig, iruis | - 70 upin, ma | ur – ou mining | , PP = 50 mr |

- Individuell anpassbare Reports
- Messdaten tabellarisch und graphisch darstellbar
- Einordnung der Blutdruckwerte nach Aktivität
- 24-Stunden Überblick aller Blutdruckund Herzfrequenz-Werte mit Tag- und Nachtdarstellung
- Blutdruck- und Herzfrequenzwerte in Form eines konventionellen Reports in 15 bzw. 30 Minuten Intervallen

ARPMpro • Ambulanter Langzeit-Blutdruck • Aktigraphie • Körperlage (Arm) • Puls Art.-Nr.: ABP100

CARDIO Set

ABPMpro + 3-Kanal-EKG-Sensor

- Ambulanter Langzeit-Blutdruck
- Aktigraphie
- Körperlage (Arm)
- Puls
- Holter EKG
- Herzrate
- Körperlage (Thorax)
- Kardio-Impedanz

Art.-Nr.: **ABP110**



ABPMpro + 3-Kanal-EKG-Sensor + Pleth-Sensor

- Ambulanter Langzeit-Blutdruck
- Aktigraphie
- Körperlage (Arm)
- Puls
- Holter EKG
- Herzrate
- Körperlage (Thorax)
- Kardio-Impedanz
- PWA / PWV
- Kont. Blutdruck mittels PTT





Das ABPMpro ist ein kompaktes und einfach zu applizierendes Langzeit-Blutdruck Messgerät. Die Zuordnung der gemessenen BD-Werte zur tatsächlichen Schlafzeit mittels Schlaf-Wach-Bestimmung (aus Aktivität und Körperlage) ermöglicht eine korrekte Klassifikation der BD-Werte und von Dipping / Non-Dipping.

Technische Daten

| 0 - 300 mmHg | | | |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| Systolisch 60 - 230 mmHg Diastolisch 40 - 130 mmHg | | | |
| individuell programmierbar, Tonsignal vor Mess-Start | | | |
| Aktivität/Körperlage, Puls, Akkuspannung | | | |
| 16 - 24 Bit Signalauflösung | | | |
| 8 GB mikroSD | | | |
| USB-Anschluss, virtuelle Dockingstation | | | |
| Li-lon-Akku (1.800 mAh), bis zu 48 h Aufzeichnungsdauer | | | |
| Schwarz/weiß, OLED; 2 Bedientasten, multifunktional | | | |
| | | | |
| 101 x 75 x 24 mm, 138 g (inkl. Akku, o. Manschette) | | | |
| • | | | |
| | | | |

Manschetten

| Größen | verfügbar in 3 Größen: S (18-24 cm), M (24-34 cm), L (34-46 cm) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrierte Elektroden | wahlweise klassische Manschette oder optional mit integrierten Elektroden zur kontinuierlichen Detektion der Herzrate |

© 2024 SOMNOmedics AG, Deutschland. Änderungen vorbehalten.

C€ 0297

11.7_DE_Rev3_2024-08

Lieferumfang

| Sets | BASIC Set | CARDIO Set | ADVANCED Set |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| ArtNr.: | ABP100 | ABP110 | ABP120 |
| Basisgerät ABPMpro Manschette Gr. M, Auswertesoftware, Ladegerät mit USB- Kabel, Gebrauchsan- weisung, Tasche & Maßband | * | * | * |
| 3-Kanal EKG-Sensor | | * | * |
| Pleth-Sensor | | | * |

